



## ***Smart* - mobile Symbol-Kommunikation mit Mind Express CE**

Obwohl **das Kommunikationsgerät Smart** nur wenig größer als ein PDA ist, beinhaltet es das leistungsstarke Kommunikationsprogramm Mind Express, mit dem ein Satzbau über Symbole möglich ist. Eine eingebaute Grammatik erlaubt, mit relativ wenigen Symbolen freie Sätze zu bilden.



Der Smart empfiehlt sich daher als ständiger Begleiter besonders für mobile Sprachbehinderte, die wegen bestehender Probleme mit der Schriftsprache eine schnelle und flexible Kommunikation über Symbole brauchen.

Das Gerät verfügt über einen lichtstarken kontrastreichen Bildschirm mit 10,1 cm Diagonale und ist mit einem Touchscreen ausgestattet, der mit Stift, Finger oder Fingernagel ausgelöst werden kann. Das Zeitverhalten lässt sich einstellen.

Die hohe Qualität der synthetischen Sprachausgabe, die guten Lautsprecher und das funktionelle Gehäuse machen den Smart zu einem effizienten portablen Kommunikationsgerät.

Eine passende Tragetasche gehört zur kompletten Ausstattung.


Das sehr einfach zu benutzende Kommunikationsprogramm wird im Umfang und Schwierigkeitsgrad bereits individuell für den Behinderten ausgelegt geliefert. Die weitere erforderliche Anpassung erfolgt am besten mittels des mitgelieferten Konfigurationsprogramms an einem Standard-PC. Dabei lassen sich für die Kommunikationsstruktur einfach weitere Seiten erstellen oder verändern, und die Einstellungen des Gerätes können zum Computer und wieder zurück auf das Gerät geladen werden.

Das System kann mit eigenem Fotomaterial oder auch natürlichen Sprachdateien erweitert werden. Auch am Gerät selbst lassen sich verschiedene Anpassungen ausführen.

Für eine umfangreiche Kommunikation zu Hause, das Training des Vokabulars und das Schreiben größerer Briefe über Symbole empfiehlt es sich, die kostengünstige Zusatzlizenz des Programms Mind Express für einen PC zu erwerben, mit der übersichtlich in großer Darstellung der Zugriff auf eine umfangreiche Kommunikationsstruktur mit 2.400 Symbolen aus allen Lebensbereichen möglich wird. Aus diesen Symbolen kann der Behinderte dann wählen, welche für unterwegs genutzt werden sollen.

Der leistungsstarke integrierte Akku erlaubt bis zu fünf Stunden netzunabhängiges Arbeiten.

Der Smart ist auch unterwegs gut zu handhaben. Ein sicherer Halt des Gerätes ist in der Hand durch ein Gummiband gegeben, welches bei Nutzung mit und ohne Tasche zur Verfügung steht. Ein Tragegurt kann ebenfalls befestigt werden.

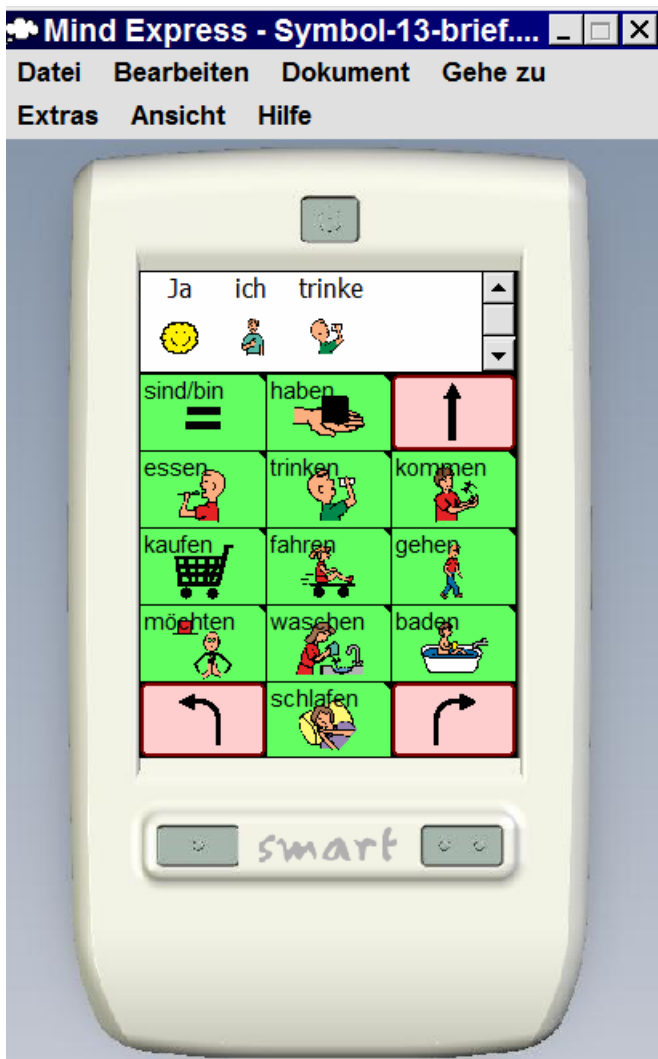

Links ist das Programmfenster zur Bearbeitung einer Kommunikationstruktur des Smart am PC, dargestellt. Dort kann diese auch gleich getestet werden.

### **Lieferumfang und Daten:**

- Touchscreen 10,1cm (4 Zoll) Bildschirmdiagonale,
- Bedienung mit Finger, Fingernagel oder Stift,
- TFT (480 x 640) mit 65.536 Farben und leuchtstarker LED-Hintergrundbeleuchtung,
- zwei eingebaute Lautsprecher mit Verstärkung,
- Abmessungen: 146 mm x 82 mm x 27-34 mm (L x B x H),
- Gewicht: ca. 340 g,
- verfügbare Farben: Oberseite: schwarz, weiß, grau und blau, Unterseite: schwarz, grau und grün,
- Hochleistungsakku,
- Betriebsdauer bis zu 5 Stunden (abhängig von Nutzungsart, ohne eingeschaltete Zusatzfunktionen),
- Microsoft® Windows® Mobile 6,
- 2 GByte Speicher intern,
- USB für Rechnerkopplung,
- WLAN 802.11b/g und Bluetooth V1.2,
- Software: Mind Express™ WinCE,
- Tragetasche, Netzteil und Bedienhandbuch,